

Inglês	Manual - Front
Português	Manual - Frente



INSTRUÇÕES DE USO

Faixa para Moldagem Ortopédica Hygia Cast Plus

1. Aplique, na parte do corpo do paciente que será imobilizada uma malha tubular sintética e a atadura ortopédica sintética.
2. Coloque as luvas.
3. Escolha um tamanho adequado. Abra a embalagem no exato momento de utilização do produto.
4. Imergir em um recipiente com água de 5 a 10 segundos. Espremendo de 2 a 3 vezes.
5. A faixa deve ser aplicada à partir da parte estreita até a parte larga, desenrolando posteriormente de forma espiral com pressão adequada sobre a parte que será imobilizada.
6. Certifique-se que a faixa não seja aplicada de maneira que fique muito esticada.
7. Aplique a faixa em movimentos espirais, mas não com tensão excessiva.
8. Modele a faixa na área aplicada. Em caso de imobilização do pé, é importante que o paciente espere duas horas até que possa apoiar totalmente o peso de seu corpo.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Deve ser manuseada por profissionais habilitados utilizando luvas. A parte do corpo do paciente que será imobilizada deverá ser recoberta previamente com malha tubular sintética e com atadura ortopédica sintética.

A embalagem protege, dentro do prazo de validade, o contato do produto com a umidade.

Imediatamente após a violação da embalagem, a atadura deve ser utilizada, caso contrário, terá que ser inutilizada, pois com o contato da umidade do ar o processo de endurecimento acontece em média de 3 minutos e é irreversível.

O produto deve ser manuseado por profissionais habilitados que devem estar utilizando luvas.

PRECAUÇÕES

Verificar a integridade da embalagem e do produto, em caso de dúvida não utilizar o mesmo.

Uma vez endurecida, a água não altera a sua resistência, porém é aconselhável que o paciente não molhe a atadura, pois isto deixará umidade em seu interior em contato com a pele que além do odor criará um ambiente propício para a criação de diversos tipos de bactérias. Deve ser manuseada por profissionais habilitados utilizando luvas.

A parte do corpo do paciente que será imobilizada deverá ser recoberta com malha tubular sintética e com atadura ortopédica sintética. No caso de imobilização do pé é importante que o paciente aguarde 2 horas até que possa apoiar totalmente o peso de seu corpo. Imediatamente após a violação da embalagem, a atadura deverá ser utilizada, caso contrário, terá que ser inutilizada, pois com o contato da umidade do ar o processo de endurecimento é imediato e irreversível. Este produto não possui contra indicação, porém deve ser aplicado por um médico ortopédico, fisioterapeuta ou técnico especializado.

IMPORTADOR:

CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. das Universidades, 325 – Pedra Branca

Palhoça – SC – CEP: 88137-315

Fone:(48) 3248-2828 |(11) 4063-0023 |(31) 4063-9244

CNPJ: 78.515.210/0001-00

Responsável Técnico: ARTHUR AURÉLIO BERNARDES - CRF/SC 15829

Site: www.controller-sc.com.br

REGISTRO ANVISA Nº 10410130018

FABRICANTE:

Woosam Medical CO., Ltd

1-31, Donsung – Dong, Inongro – Gu, Seoul, Korea

Coréia do Sul

Tel: 82-2-743-0781

Inglês	Manual - Rear
Português	Manual - Verso



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

APRESENTAÇÃO

As faixas para moldagem ortopédica Hygia Cast Plus são embaladas em embalagem individual plástica e reembaladas em caixa de papelão contendo 10 unidades por caixa.

MODELOS

WS-0011; WS-0021; WS-0022; WS-0023; WS-0024; WS-0025; WS-0026; WS-0027; WS-0028; WS-0029; WS-002OR; WS-0031; WS-0032; WS-0033; WS-0034; WS-0035; WS-0036; WS-0037; WS-0038; WS-0039; WS-003OR; WS-0041; WS-0042; WS-0043; WS-0044; WS-0045; WS-0046; WS-0047; WS-0048; WS-0049; WS-004OR; WS-0051; WS-0052; WS-0053; WS-0054; WS-0055; WS-0056; WS-0057; WS-0058; WS-0059; WS-005OR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A atadura sintética é confeccionada com 100% de fibra de poliéster. As faixas para moldagem ortopédica Hygia Cast Plus são disponibilizadas nas seguintes dimensões:

5,0cm x 3,6m (2" x 4yds) + 10%	7,5cm x 3,6m (3" x 4yds) + 10%
10,0cm x 3,6m (4" x 4yds) + 10%	12,5cm x 3,6m (5" x 4yds) + 10%

Contendo 10 unidades por caixa.

Cores: Branca; Verde; Rosa; Azul; Vermelha; Amarela

RECOMENDAÇÕES

1. Nos casos de imobilização do pé é recomendado que seja utilizada uma sapatilha adequada.
2. A retirada da atadura após o período de imobilização deverá ser feita com uma serra elétrica adequada para esta operação.
3. Se a pele ou a roupa apresentar vestígios da emulsão da atadura a limpeza poderá ser feita com álcool, porém, é de difícil remoção.
4. O rolo deverá ser imerso em um recipiente de água de 5 a 10 segundos e posteriormente desenrolada de forma espiral com pressão adequada, sobre a parte que será imobilizada.

Produto de uso único. Após o uso, é facilmente destruída pela queima não provocando nenhum problema ambiental.

“PRODUTO DE USO ÚNICO” / “DESTRUIR APÓS O USO”

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado adequadamente em caixas para a posterior estocagem. Deve ser estocado em prateleiras de acordo com as especificações da Vigilância Sanitária e em local de ventilação e temperatura entre 15° C e 30° C, seco, livre de luz solar, umidade e vapores químicos

TRANSPORTE

Em temperatura ambiente em local limpo, seco, livre de luz solar, umidade e vapores químicos. No transporte deverá estar protegida do sol para evitar altas temperaturas. Não colocar peso sobre a caixa de papelão que exceda a resistência da mesma, pois poderá danificar a embalagem aluminizada causando inutilização.