


Tela Intensificadora de Raio-X Ecran Lumax

K LUMAX N

Modo de Utilização

Colagem dos Ecrans

Verifique se as superfícies onde os ecrans serão colados (tampa e fundo do chassis) estão limpas (fig.1).

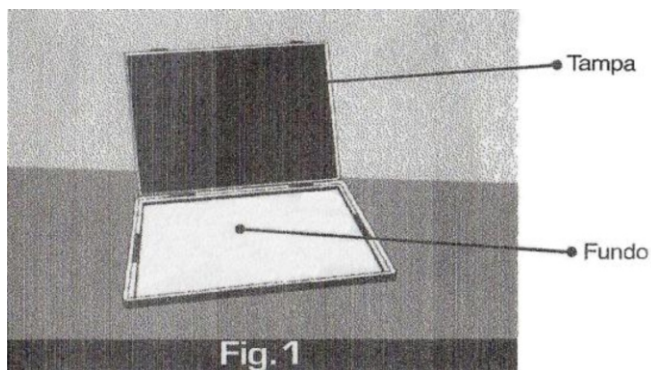


Dependendo da marca, poderá haver distinção entre o ecran que será colado no fundo e na tampa do chassis. Isso será confirmado verificando se, no verso dos ecrans, existe a legenda front ou back.


Durante todo o processo de colagem, mantenha a parte frontal dos ecrans protegida pelo papel que acompanha a embalagem, já que qualquer dano ou sujeira acarretará em manchas no filme.

Selecione o ecran com a legenda back e posicione-o no fundo do chassis com a face voltada para baixo. Retire o decalque dos adesivos (fig. 2) e certifique-se de que o ecran esta centralizado em relação ao chassis.

Feche o chassis com cuidado, até o travamento, pressionando a tampa com as mãos para reforçar a colagem (fig. 3).

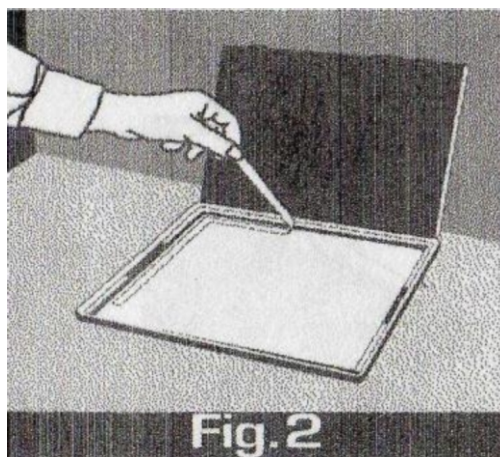


Abra novamente o chassis e, utilizando um papel como proteção, pressione as bordas dos ecrans finalizando a colagem.

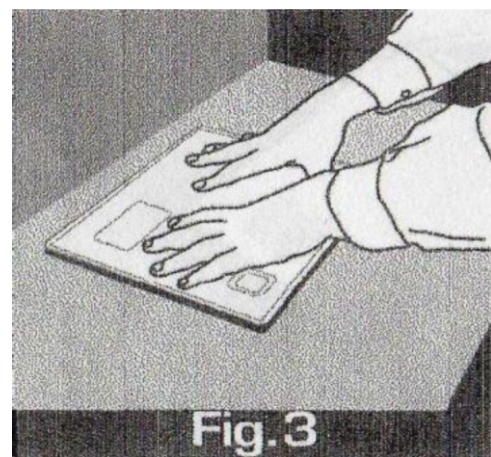


Posicione o outro ecran, agora na tampa, com a face voltada para baixo, alinhando-o com o primeiro ecran já colocado.

Retire o decalque dos adesivos (fig. 4) e, com cuidado, feche o chassi deixando a tampa voltada para baixo (fig. 5), até o travamento.

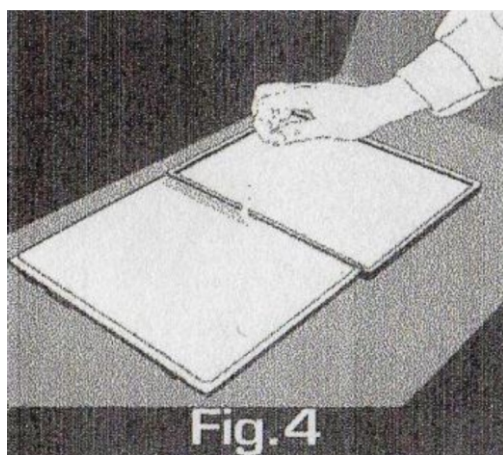

Da mesma forma, pressione a tampa e abra o chassi, pressionando as bordas para finalizar a colagem.

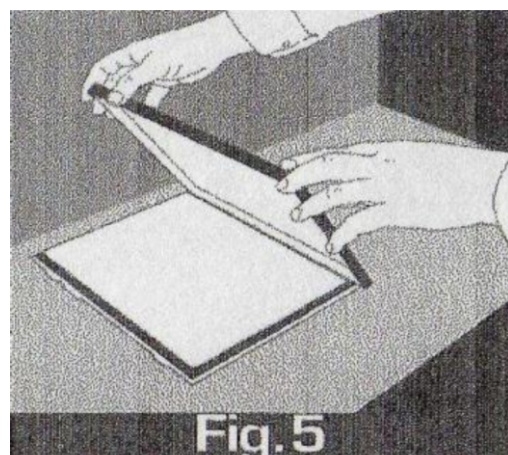

Os ecrans são comercializados nos seguintes tamanhos:

13 x 18 cm; 15 x 30 cm; 15 x 40 cm; 18 x 24 cm; 20 x 25 cm; 24 x 30 cm; 30 x 40 cm; 35 x 35 cm; 35 x 43 cm; 30 x 60 cm; 35 x 91 cm; 30 x 120 cm



- * **Manusear com extremo cuidado**
- * **Usar as duas mãos para segurar o ecran**
- * **Não dobre**

Instrução para Limpeza

- 1 - Umedecer um pano macio de algodão que não deixe resíduos com um agente de limpeza neutro.
- 2 - Esfregar de forma uniforme e suave sobre toda a superfície do ecran.
- 3 - Deixar o chassis aberto com o ecran limpo por uns 10 minutos para que evapore totalmente o material liquido.
- 4 - Armazenar o ecran à temperatura ambiente em local seco.

Advertências

Nos procedimentos de trabalho o operador deve ter cuidados ao retirar o filme, especificamente para não danificar o ecran com a unha, pois os pontos onde a camada de fósforo for retirada o filme não será mais sensibilizado.

No local de estoque, deve permanecer em temperatura ambiente e não pode possuir incidência direta de luz. Deve ser armazenado em prateleiras com no máximo trinta unidades empilhadas.

O tempo de estocagem é indeterminado, não há um tempo determinado de vida útil do produto em estoque se cumpridas as condições determinadas.

Precauções

- a) Não trabalhar com as unhas compridas;
- b) Não deixar o cassete (chassis) com ecrans fechados logo após limpeza, pois a umidade poderá criar fungos que o inutilizarão;
- c) Ter todo cuidado para que não seja respingado revelador, pois sua mancha também inutiliza o ecran;
- d) Não passar sobre o ecran produtos abrasivos para limpeza, pois estes retiram a camada de proteção. Deve-se passar somente um pano de algodão umedecido em água e realizar movimentos leves e longitudinais e posteriormente transversais para completar a limpeza deixando-o aberto tempo suficiente para que seque completamente.

Atenção:

Jamais colocar o cassete (chassis) aberto de lado enquanto ele seca, isto poderá causar dano nos ecrans.

Garantia Limitada

A **Controller Comércio e Serviços Ltda.** garante o **Ecran - Lumax** por um período de doze meses a contar da data da emissão da nota fiscal. Esta garantia é válida para as unidades devidamente instaladas, mantidas e usadas para o seu fim pretendido. Se a unidade for dada como defeituosa dentro do período de garantia especificado, a **Controller Comércio e Serviços Ltda** deve ser notificada para uma inspeção por um representante de serviço autorizado. Se for determinado que a falha é resultado de defeito de fabricação, a **Controller Comércio e Serviços Ltda.** procederá os reparos ou substituição do mesmo. Esta garantia será anulada se qualquer serviço for realizado de forma inadequada. A garantia acima, em sua totalidade, é a única obrigação de garantia da **Controller Comércio e Serviços Ltda.** Nenhum outro acordo, garantia ou afirmações (verbais, escritas, expressas ou implícitas) incluindo a garantia de comercialização serão reconhecidas. Para informações adicionais ou autorização para devolução de produto defeituoso queira contatar o nosso setor de atendimento.

Importador: Controller Comércio e Serviço Ltda.

Av. das Universidades, 325 - Palhoça - SC -

CEP 88137-315 - CNPJ: 78.515.210/0001-00

Fones: 11 4063-0023 | 31 4063-9244 | 48 3248-2828

E-mail: sac@controller-sc.com.br

Site: www.controller-sc.com.br

Fabricante: UNIRAY MEDICAL LLP - #4, Plot No 102, Yashawant Sadan - Dr MB Raut Marg
MUMBAI - 400028 - India.

Responsável Técnico: Márcia Misumi Murakami Rosa Stanck Pinheiro - CRF/SC 8166

Registro da ANVISA: 10410130030