

bioland[®]

Treinamento de Produto
Bandagem Elástica Adesiva

Tmax
Tape

Estrutura da Apresentação

- Quem criou
- Sobre a TMAX no mundo
- Apresentações do Produto
- Como funciona
- Quem aplica
- Modo de aplicação
- Exposição e abordagem no PDV

Quem criou

- O **Kinesio Taping** é um método de ligaduras criado no início dos anos setenta pelas mãos de um quiroprata japonês de nome Kenzo Kase.
- Para ele ligamentos e tendões poderiam ser ajudados através de um apoio ou suporte externo, e para isso era somente necessária uma fita ou banda elástica que fosse capaz de auxiliar a função normal dos tecidos.



Dr. Kenzo Kase
founder of Kinesio Taping® Method

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenzo Kase', written in a cursive style.

Sobre a TMAX no Mundo

- Iniciou suas atividades em 2006, produzindo basicamente bandagens elásticas. Em 2011 já se tornou a maior fabricante de fitas na Coreia, tomando proporção internacional.
- Para comprovar a qualidade e resistência nas aplicações profissionais, a empresa focou seus investimentos em seleções de polo aquático
- Atualmente a TMAX possui duas linhas de fitas: uso doméstico e profissional. Para o Brasil a Bioland traz apenas a profissional (mais aderência e resistências em usos extremos).

Sobre a TMAX no Mundo

IRANIAN WATER POLO TEAM
USED TMAX TAPE IN A GAME!
TMAX TAPE, A BETTER WAY OF LIFE.



Apresentações do Produto

- O produto é vendido por rolo, com 5 cm de largura e 5 metros de comprimento (padrão do mercado).
- A cor é apenas estética
- 9 cores disponíveis
- Não possui medicação
- Composição:
96% algodão e 4% elastano
- 140% de expansão



Como funciona

- A comprovação clínica ainda está em processo, mas face a eficácia, já temos órgãos públicos licitando.
- Existem 3 vertentes de trabalho que estão sendo estudadas:
 - Efeito placebo
 - Concentração de glóbulos brancos
 - Limitação do movimento da área lesionada



Como funciona

- A aplicação é específica por região, conforme exemplo abaixo:



Dor no Pescoço

1. Com a cabeça baixa, alongue o pescoço o máximo que conseguir.
2. Faça uma âncora em forma de "Y" na parte superior da coluna.
3. Aplique a fita nos dois lados do pescoço.



Dor no Ombro

1. Incline ligeiramente a cabeça para o lado oposto da aplicação da fita.
2. Aplique um "I" ao longo do músculo no ombro.

Quem aplica

- Existem cursos específicos para especialização em bandagem funcional (feito por médicos ortopedistas, fisioterapeutas e professores de educação física).
- Após a primeira aplicação, é muito comum a aplicação doméstica (sem acompanhamento de um profissional).

Modo de aplicação

- Existem basicamente 3 formas de aplicar:
 - Suporte
 - Limitação de movimento
 - Com compressão

Exposição e abordagem no PDV

- O ideal é colocar junto com os imobilizadores ortopédicos
- Temos caixa display para 6 rolos, melhorando a exposição do produto sobre o balcão/prateleira.



Fim

A Bioland agradece a atenção e qualquer informação ou dúvida, segue nossos contatos:

(48) 3248-2828

(11) 4063-0023

(31) 4063-9244

(51) 4063-9277

TIM / Whatsapp: (48) 9 8402-7668