



Parabéns por ter adquirido o estetoscópio rappaport Bioland, um produto de alta qualidade e confiabilidade. Leia as instruções abaixo para ter o máximo proveito deste produto.

Componentes do Produto

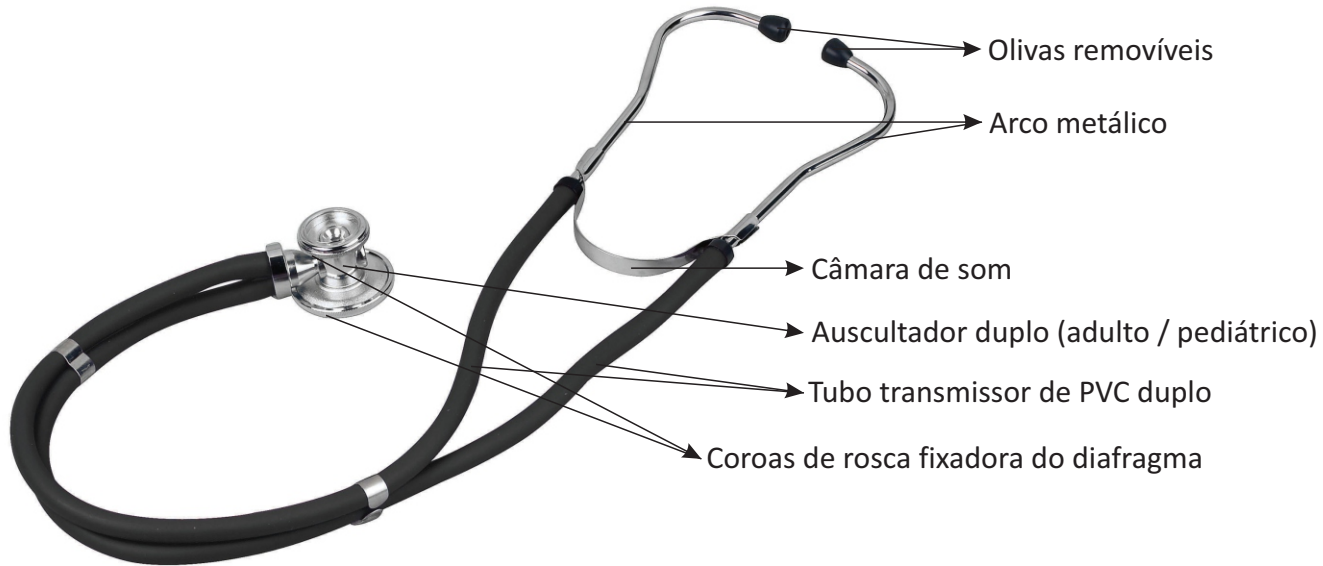

Peças adicionais inclusas:

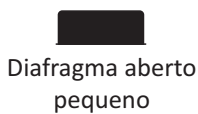

Indicação de Uso

O estetoscópio rappaport Bioland é recomendado para a ausculta não invasiva dos ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares, entre outros. Este produto é ideal para uso clínico.

Modo de Utilização

- Posicione as olivas nos condutos auditivos, isolando qualquer ruído externo;
- Gire o auscultador 180º para selecionar o diafragma desejado (adulto ou pediátrico);
- Coloque em contato o diafragma na área ao qual será analisada.

Quando o diafragma é exposto à vibrações, ele transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC (material que isola estas ondas de influência externa). Estes sons chegam aos tubos metálicos que fixam as olivas auriculares.

O estetoscópio rappaport Bioland possui os seguintes diafragmas abertos inclusos:

Pequeno: Aplicação infantil

Médio: Utilizado em pequenas partes (entre as costelas). Ideal para sons de média e baixa frequência.

Grande: Usado para escutar sons cardíacos de baixa frequência.

Limpeza

Após a utilização deste produto, recomenda-se a limpeza das olivas com um líquido anti-séptica ou desinfetante. Importante: Não utilize nenhuma forma de esterilização térmica. Produtos como álcool, benzina, tiner danificará o diafragma.

Armazenamento e Transporte

Mantenha o estetoscópio em local arejado e seco. Não exponha ao sol e verifique as faixas de temperatura recomendadas.

Temperatura: 0°C à 50°C / Umidade relativa do ar máxima: 95%

Versões do Produto

Este produto possui as seguintes apresentações: Estetoscópio rappaport duplo (adulto e infantil). O produto é oferecido em diversas cores.

Está incluso também peças adicionais para troca, embaladas individualmente em plástico PVC.

Termo de Garantia

- 1) A Controller Comércio e Serviços Ltda. garante um ano a partir da data da compra original contra defeitos de fabricação, com a comprovação da nota fiscal de compra. Falhas do estetoscópio rappaport devido a utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de uso não estão cobertas por esta garantia.
- 2) Peças sujeitas a desgaste por utilização (olivas e diafragma) possuem garantia de 90 (noventa) dias. A garantia de 1 ano não se aplica para estas partes.
- 3) Não desmonte o estetoscópio rappaport, pois isso cancelará a garantia e fará com que o produto possa exibir falsos resultados.
- 4) Se a Controller Comércio e Serviços Ltda. receber notificação de algum defeito durante o período de garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente.
- 5) Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Controller Comércio e Serviços Ltda. para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago a Controller Comércio e Serviços Ltda. ou ao canal de venda autorizado.

Importador:



Controller Comércio e Serviços Ltda

Av. das Universidades, 325 - Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137-315

CNPJ: 78.515.210/0001-00

Telefones: (11) 4063-0023 - (31) 4063-9244 - (48) 3248-2828

E-mail: sac@controller-sc.com.br

Site: www.controller-sc.com.br

Fabricante: NINGBO FREE TRADE ZONE TENSO MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

País de Fabricação: China

Responsável Técnico: Arthur Aurélio Bernardes - CRF/SC 15829

Registro da ANVISA: 10410130028